

ASPIRATOR KATARU DO NOSA KATAREK TRAVEL



Cena: 47,17 pln

Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	aspirator
Producent	DUNA SP. Z O.O.

Opis produktu

ASPIRATOR KATARU DO NOSA KATAREK TRAVEL

Opis produktu

Katerek Travel to rozwiązanie 2w1 do aspiracji ustnej i do odkurzacza u dzieci od 1 dnia życia. Korzystanie z aspiratora jest o tyle istotne, że zalegająca wydzielina może powodować dyskomfort i prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych nosa, uszu, gardła i dróg oddechowych. Wersja do odkurzacza poradzi sobie z gęstym i zalegającym katarzem. W podróży, na spacerze kiedy nie ma możliwości użycia odkurzacza z pomocą przychodzi wersja ustna aspiratora, która sprawdzi się także w codziennej pielęgnacji. Opakowanie w formie kosmetyczki to praktyczne rozwiązanie w podróży.

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem przeczytać instrukcję obsługi. Stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

Dokładnie wypłukać w gorącej wodzie przed pierwszym użyciem. Po każdym użyciu oczyszczać, można stosować deterenty przyjazne dzieciom. Do zabiegu oczyszczania najlepiej jest trzymać dziecko w ramionach lub na kolanach. Czas odciągania wydzieliny z jednego otworu nosowego wynosi około 5 sekund. Zabieg odciągania zaleca się wykonywać 2-3 razy dziennie, a jeśli zachodzi taka potrzeba to nawet częściej.

Aspirator podłączony do odkurzacza: komorę należy połączyć z końcówką, a wąski koniec aspiratora włożyć do łącznika, natomiast jego stożkowy koniec do rury ssącej odkurzacza. Końcówkę aspiratora ostrożnie włożyć do otworu nosowego dziecka, włączyć odkurzacz i rozpocząć odciąganie. Czynność powtórzyć w drugiej dziurce.

Aspirator ustny: komorę należy połączyć z końcówką, zaś ustnik włożyć do łącznika. Końcówkę aspiratora przyłożyć do otworu nosowego, ustnik włożyć do ust i rozpocząć odciąganie wydzieliny. Czynność powtórzyć w drugiej dziurce.

Szczegóły

1. aspirator może być używany z odkurzaczem lub za pomocą ust,
2. kosmetyczka podróżna ułatwiająca transport,
3. przydatny zarówno w przypadku wodnistej kataru, jak i codziennej higienizacji nosa.

****Zawartość opakowania:****

aspirator kataru z rozkręcaną komorą,
2 końcówki do noska,
końcówkę do odkurzacza,
końcówkę do aspiracji ustnej,
kosmetyczkę podróżną – opakowanie

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Zespół Vital-shop.pl