

# Corega Super Mocny Delikatnie Miętowy Krem mocujący XL 70g

Cena: 21,21 pln



## Opis słownikowy

Opakowanie	70 g
Postać	-
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.

## Opis produktu

### Corega Super Mocny Delikatnie Miętowy Krem mocujący XL 70g

#### **\*\*Opis produktu:\*\***

Corega Super Mocny zapewnia mocne, długotrwałe utrzymanie protezy zębowej. Uszczelnia protezę i zapobiega dostawaniu się resztek pokarmu pod jej powierzchnię. Poprawia stabilność protezy, zwiększa siłę zgryzu i pozwala spożywać „trudne pokarmy”. Ma miętowy smak i zapewnia długotrwałe uczucie świeżości. Zwiększa komfort użytkowania protezy nawet gdy jest ona dobrze dopasowana. Daje pewność siebie przez cały dzień.

#### **\*\*Sposób użycia:\*\***

Zakładanie: protezę dokładnie umyć i wysuszyć. Nanieść krem krótkimi paskami, niezbyt blisko krawędzi. Wypluć jamę ustną i założyć protezę. Docisnąć ją palcami, a następnie przygryźć na kilka sekund.

Usuwanie: przepłukać jamę ustną wodą. Powoli rozruszać protezę i ją wyjąć. Usunąć resztki kremu z protezy i podniebienia za pomocą ciepłej wody i szczoteczki. Oczyszczyć protezę specjalnie do tego przeznaczonym preparatem i opłukać wodą.

#### **\*\*Skład:\*\***

Calcium/sodium PVM/MA copolymer, petrolatum, cellulose gum, paraffinum liquidum, propylparaben, aroma, CI 45430.

#### **\*\*Pojemność:\*\***

70g

#### **\*\*Producent:\*\***

STAFFORD MILLER DUNGARVAN

**\*\*ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:\*\***

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.  
Wyrób medyczny może być stosowany przez dłuższy czas, bez żadnego ryzyka lub przeciwwskazań.  
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.  
Przechowywać w temperaturze pokojowej.  
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Zespół Vital-shop.pl