

TEST Multi narkotykowy z moczu



Cena: 23,20 pln

Opis słownikowy

Opakowanie	1 op.
Postać	-
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.

Opis produktu

TEST Multi narkotykowy z moczu

****Opis produktu:****

Multi TEST to uniwersalny i szybki paskowy test narkotykowy pozwalający na wykrycie w moczu badanej osoby aż 6 różnych narkotyków.

Jest to niezwykle przydatne narzędzie diagnostyczne do zastosowania w warunkach domowych, które pozwala znaleźć ślady zażycia najbardziej popularnych narkotyków, takich jak amfetamina, heroina, kokaina, morfina, marihuana i haszysz.

Do przeprowadzenia badania potrzebna jest odpowiedniej objętości próbka moczu, zgromadzona do suchego i czystego naczynia. Niezbędny jest również zegarek z sekundnikiem. Test zanurzamy w próbce na 15 sekund, a wyniki odczytujemy po upływie 5 minut, ich interpretacja po czasie dłuższym niż 15 minut nie jest już wiarygodna.

Opakowanie Multi TEST zawiera 4 paski testowe złączone w jednej plastikowej obudowie, co umożliwia wykonanie jednorazowego badania na obecność wszystkich 6 narkotyków. Dzięki temu badanie przeprowadzamy szybko i wygodnie.

Do analizy wystarczą 4 paski, ponieważ morfina i heroina wykrywana jest na jednym pasku testowym (wynik w okienku MOR), podobnie jak haszysz i marihuana (wynik w okienku THC). Rezultat pozytywny wskazujący na obecność niedozwolonych substancji oznacza się w postaci jednego różowego prążka w strefie kontrolnej C.

Przed przystąpieniem do badania należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi, jest to warunek konieczny do poprawnego przeprowadzenia testu.

Pamiętajmy o tym, że poszczególne rodzaje narkotyków utrzymują się w organizmie przez różny czas. Marihuanę i haszysz można wykryć przez okres 5-20 dni, amfetaminę w czasie 1-3 dni od momentu zażycia, morfinę i heroinę 2-3 dni, a kokainę 1-4 dni.

****Sposób użycia:****

Samo badanie za pomocą Multi TEST jest proste i powinno być wykonane na podstawie próbki świeżego moczu zebranego do suchego i czystego pojemnika. Pora jego pobrania nie jest istotna, należy natomiast pamiętać, że w przypadku niemożności natychmiastowego przeprowadzenia diagnozy, próbkę należy przechowywać nie dłużej niż 48 godzin w temperaturze oscylującej wokół 2-8°C. W takim wypadku przed rozpoczęciem badania należy ją ogrzać.

Zanim przeprowadzimy test, musimy pamiętać o tym, że:
nie wolno zanurzać dolnej obudowy w próbce moczu
test powinien być zanurzony w próbce na tyle długo, aż w okienkach wynikowych pojawią się prążki kontrolne. Proces trwa zazwyczaj ok. 15 sekund.

badany mocz nie może mieć bezpośredniej styczności z okienkami wynikowymi

Zdejmij osłonę pasków testowych i ostrożnie zanurz je w próbce moczu, do momentu, w którym w okienkach wynikowych pojawią się prążki kontrolne C. Cały proces może trwać ok. 15 sekund. Uważaj, aby ciecz nie dotknęła dolnej krawędzi obudowy testu.

Po 15 sekundach i pojawieniu się prążków kontrolnych wyjmij test z próbki i umieść na płaskiej powierzchni. Ostateczne wyniki należy odczytać po upływie 5 minut.

****ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:****

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.

Wyrób medyczny może być stosowany przez dłuższy czas, bez żadnego ryzyka lub przeciwwskazań.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Zespół Vital-shop.pl